

## VERBRAUCHERHINWEIS

---

GlaxoSmithKline (GSK) warnt vor einem möglichen Gesundheitsrisiko durch einen dauerhaft übermässigen Gebrauch der zinkhaltigen Prothesenhaftmittel COREGA<sup>®</sup> Fresh, COREGA<sup>®</sup> Sensitive und COREGA<sup>®</sup> Ultra/Extra stark. GSK hat sich als Vorsichtsmaßnahme freiwillig dazu entschlossen, die Herstellung, den Vertrieb und die Bewerbung dieser Produkte einzustellen.

Bei GSK steht die Sicherheit der Verbraucher an erster Stelle. Deshalb beobachten wir kontinuierlich die wissenschaftliche Literatur und die Nebenwirkungsmeldungen, die wir in Bezug auf all unsere Produkte erhalten. Es gibt eine Vielzahl von Zinkquellen. Zink ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Dennoch hat GSK im Jahr 2009 eine erhöhte Anzahl an Nebenwirkungsmeldungen in Zusammenhang mit zinkhaltigen Prothesenhaftcremes erhalten. Zusammen mit Literaturveröffentlichungen ergeben sich Anzeichen dafür, dass ein übermässiger Gebrauch dieser Produkte, üblicherweise über mehrere Jahre hinweg, zu einer Anreicherung grosser Zinkmengen im Körper führen kann. Im Zusammenhang mit dieser Anreicherung stehen neurologische Symptome, wie zum Beispiel Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Schwäche der Extremitäten, Schwierigkeiten beim Gehen und Gleichgewichtsstörungen sowie Anämie (Blutarmut). Diese Fälle treten sehr selten auf, wenn man bedenkt, dass weltweit etliche Millionen Verbraucher diese Produkte benutzen.

Es ist wichtig festzuhalten, dass Zink nicht über die Mundschleimhaut, sondern nur durch Verschlucken vom Körper aufgenommen wird. Das Verschlucken geringer Produktmengen kann bei bestimmungsgemässer Anwendung vorkommen, ist jedoch unbedenklich.

COREGA<sup>®</sup> Fresh, COREGA<sup>®</sup> Sensitive und COREGA<sup>®</sup> Ultra/Extra stark sind sicher, wenn sie entsprechend den Anweisungen der Produktverpackung angewendet werden (siehe unten). Der grösste Teil der Verbraucher befolgt diese Hinweise. Es gibt jedoch einige Verbraucher, die mehr Haftcreme benutzen und diese häufiger als einmal pro Tag verwenden, insbesondere um schlecht sitzende Prothesen auszugleichen.

## Was sollten Verbraucher tun?

1. Falls Sie die Produkte wie empfohlen angewendet haben, können Sie diese auch weiterhin bedenkenlos verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Produkte entsprechend der Anweisungen auf der Produktverpackung benutzen:

*„COREGA® Haftcreme gibt Ihnen sicheren Halt bei nur einer Anwendung am Tag. Eine geringe Haftcrememenge reicht aus und verhindert seitliches Ausquellen. Bei Ausquellen Haftcrememenge reduzieren. Nur einmal täglich anwenden. Eine 40 g Tube reicht für ca. 6 Wochen. Mehrverbrauch kann ein Hinweis sein, dass Ihre Prothese nicht mehr gut sitzt. In diesem Fall auf weitere Haftcremeanwendung verzichten und den Sitz Ihrer Prothese zahnärztlich prüfen lassen. Konsultieren Sie regelmässig Ihren Zahnarzt.“*

2. Falls Sie zinkhaltige Haftcreme wie COREGA® Fresh, COREGA® Sensitive und COREGA® Ultra/Extra stark über mehrere Jahre in grösseren Mengen als in den Produkthinweisen angegeben verwendet haben, wie zum Beispiel:

- Die Haftcreme mehr als einmal am Tag benutzt haben, oder
- Ihre Tube vor der auf der Produktverpackung angegebenen Zeit aufgebraucht ist; eine 40g Tube reicht für ca. 6 Wochen, oder
- Sie diesbezüglich Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit haben

### **müssen Sie**

- die Verwendung des Produkts einstellen.
- mit Ihrem Arzt sprechen.
- eine zinkfreie Prothesenhaftcremealternative verwenden.

Verbraucher können sich mit Fragen unter der folgenden kostenfreien Telefonnummer: **0800 812 222** gern an GSK wenden.

Weitere Informationen zu Corega® und Zink erhalten Sie unter [www.glaxosmithkline.ch](http://www.glaxosmithkline.ch)

**GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG, 3053 Münchenbuchsee**

im Februar 2010

---

## **Anwendungshinweise für eine effektive und sichere Anwendung von COREGA® Fresh, COREGA® Sensitive und COREGA® Ultra/Extra stark:**

COREGA® Haftcreme gibt Ihnen sicheren Halt bei nur einer Anwendung am Tag. Eine geringe Haftcrememenge reicht aus und verhindert seitliches Ausquellen. Bei Ausquellen Haftcrememenge reduzieren. Nur einmal täglich anwenden. Eine 40 g Tube reicht für ca. sechs Wochen. Mehrverbrauch kann ein Hinweis sein, dass Ihre Prothese nicht mehr gut sitzt. In diesem Fall auf weitere Haftcremeanwendung verzichten und den Sitz Ihrer Prothese zahnärztlich prüfen lassen. Konsultieren Sie regelmässig Ihren Zahnarzt.

### **Auftragen wie folgt:**

1. Zahnprothese reinigen und abtrocknen
2. Haftcreme in kleinen Streifen (ca. 6 mm) nicht zu dicht am Prothesenrand auftragen
3. Mund mit Wasser ausspülen, Prothese einsetzen, kurz andrücken und fest zubeissen

### **Anwendungshinweise zur Entfernung der Prothese:**

- Mund mit Wasser ausspülen
- Mit einer leichten Rüttelbewegung Prothese langsam entfernen
- Haftcremerückstände von der Prothese und aus dem Mund mit warmem Wasser und einer weichen Zahnbürste entfernen
- Verwenden Sie Gebissreinigertabletten, um Ihre Prothese gründlich zu reinigen

### **Wichtige Produktinformationen:**

- Dieses Produkt enthält Zink. Fragen Sie Ihren Arzt, falls Sie regelmässig zinkhaltige Produkte einnehmen.
- Nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Produktes verwenden. Bei Unverträglichkeit Verwendung des Produktes einstellen.
- Das Verschlucken geringer Produktmengen kann bei bestimmungsgemässer Anwendung vorkommen, ist jedoch unbedenklich.
- Anwendungshinweise beachten. Der dauerhaft übermässige Gebrauch dieser Produkte kann durch eine zu hohe Zinkzufuhr zu ernsthaften gesundheitlichen Folgen führen.

**Bilder der betroffenen Produkte:**



**COREGA® Fresh**



**COREGA® Sensitive**



**COREGA® Ultra/Extra stark**